



Pedimetro FootMeter

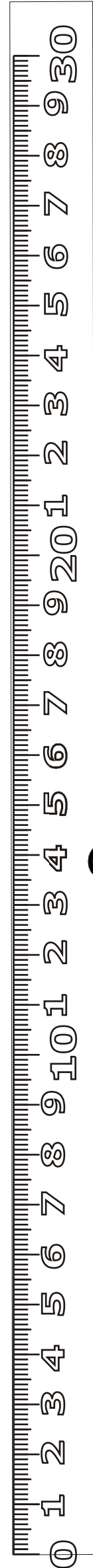

®



A (misura campione) (Base unit)

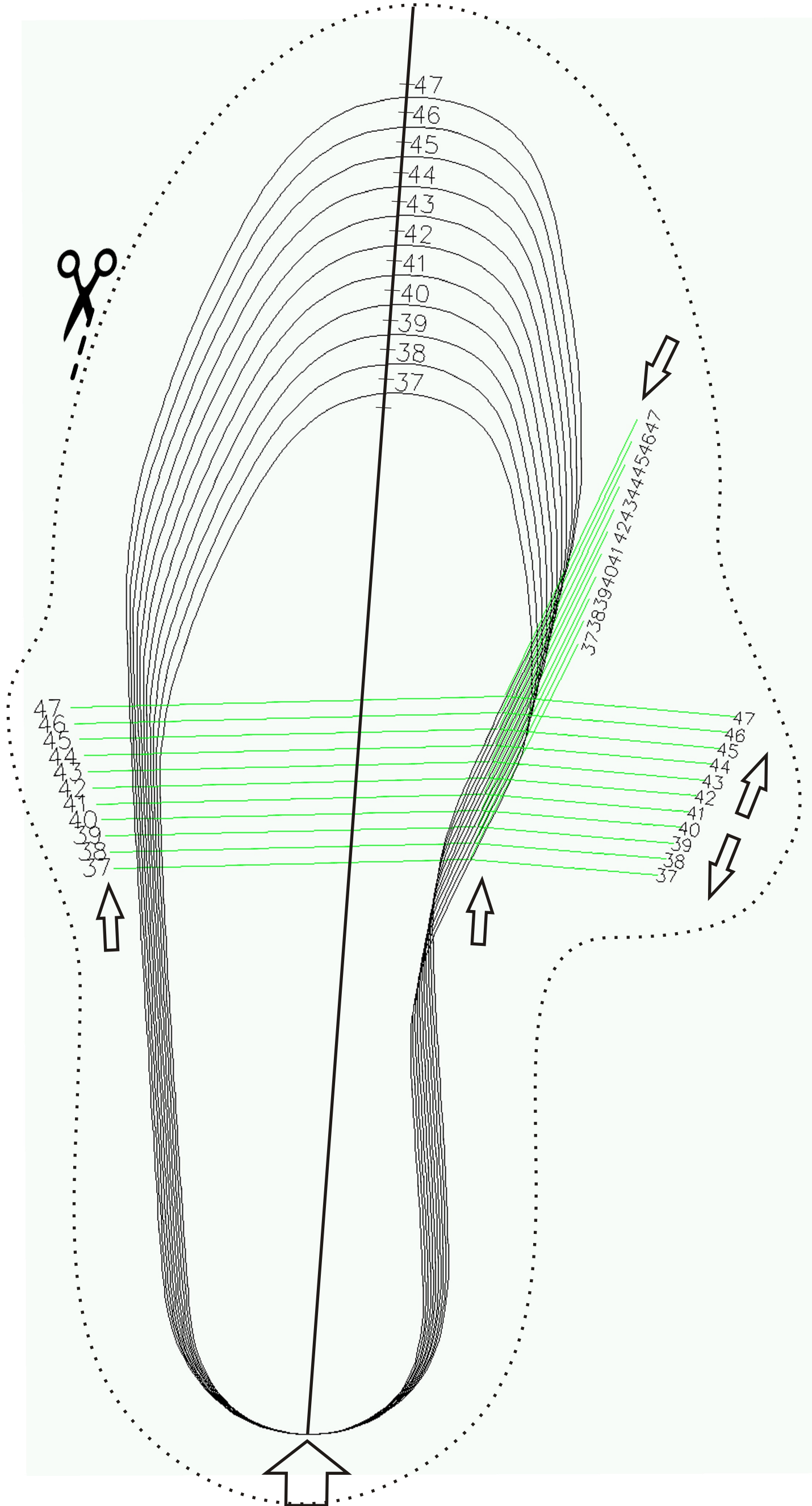

Pedimetro FootMeter



(C) Lung. Cam	
(T) Taglia	
(Pt) Calzata	

Istruzioni

- Eseguite una stampa in formato A3 del "pedimetro" allegato.
- Prendete misura con un righello della lunghezza campione in (M) scrivendone il valore nel campo (C).

Rilevazione della Taglia

- Disponete il vs piede sinistro con l'estremo del tallone in corrispondenza del punto individuato dalla freccia A lungo il percorso dell'asse.
- Tracciate con una matita ben visibile il profilo del Vs piede tenendo la matita ortogonale al foglio.


Togliete il piede dal foglio e leggete annotandolo nel campo (T) della tabella il codice corrispondente al punto di intersezione tra il punto più alto del profilo disegnato e l'asse (A)

Rilevazione della Calzata

- Ritagliate il pedometro per facilitare le misure lungo la linea tratteggiata.
 - Ritagliate quindi la fascetta graduata (F) lungo il perimetro esterno e disponetela sul pedimetro.
- Il PUNTO O deve essere posto in corrispondenza dell'incontro tra le direttrici (come Es. Grafico n° 42)

della Vs misura relativa.

- Effettuare quindi la misura della calzata facendo scorrere la fascetta in corrispondenza della propria taglia in lunghezza misurata (Pt). Segnare il dato nella tabella di riepilogo campo Calz.

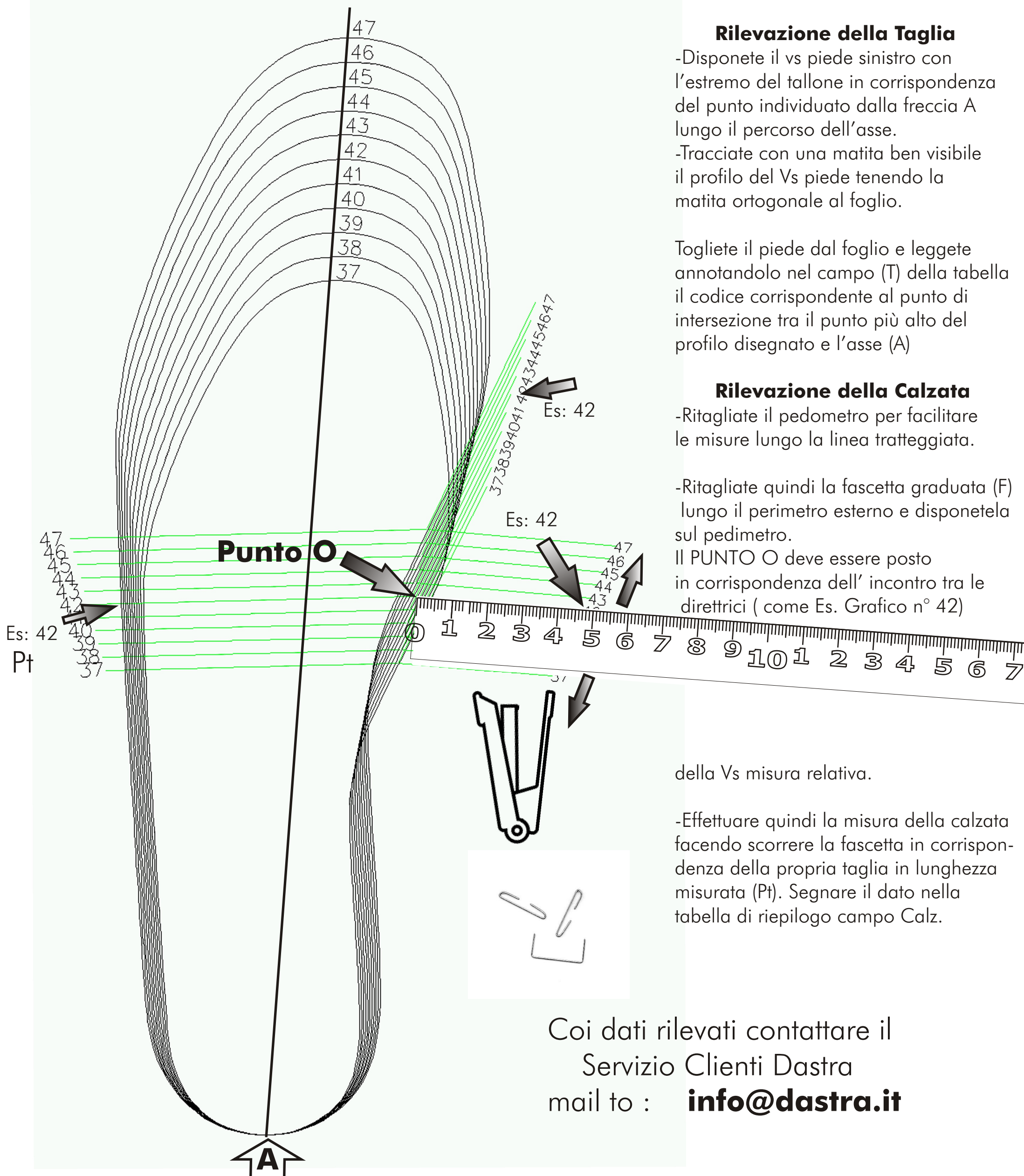

Coi dati rilevati contattare il
Servizio Clienti Dastra
mail to : **info@dastra.it**